

ISODENT®

Izolační roztok

Výrobce:

SpofaDental a.s., Markova 238, CZ–506 46 Jičín, www.spofadental.com

Složení:

alginát sodný, benzoan sodný, fosforečnan sodný, formaldehyd, destilovaná voda

Charakteristika:

Isodent® je alginátový roztok určený k izolaci sádrových forem. Předností přípravku je jeho izolační schopnost i k částečně neodmaštěnému povrchu sádrové formy.

Použití:

Potřebné množství Isodentu se odlije do menší nádoby a plochým štětcem se rozetře na ještě teplou sádrovou formu (cca 40 °C). Roztok se nanáší ve slabé vrstvě. Pokud je nutno nátěr opakovat, provádí se teprve po zaschnutí nátěru prvního.

Varování:

S přípravkem se doporučuje pracovat v digestoři. Odpařování formaldehydu při případném vdechování škodí zdraví.

Skladování:

V suchu a temnu, při teplotě od 5 do 25 °C, v dobře uzavřeném obalu.

Upozornění:

Nevystavovat přípravek teplotám pod bodem mrazu. Při nižších teplotách hrozí znehodnocení přípravku.

Doba použitelnosti:

1 rok

Balení:

250 g